

Surfalkan SH[®]

DETERGENTE DESINFECTANTE DE SUPERFICIES

LISTO PARA USAR



Diseñado para realizar limpieza y desinfección de manera rápida y en una sola aplicación en superficies de alto contacto, elevadas y estructurales, mobiliario, conexiones, circuitos de medios hospitalarios y odontológicos.

BENEFICIOS

- Inicio de acción inmediato, efecto bactericida, virucida, fungicida y esporicida.
- La acción potente y rápida de **Surfalkan SH** se basa en la combinación de agentes limpiadores humectantes y activos antimicrobianos que desprenden las manchas y desinfectan rápidamente las superficies tratadas en cualquier rutina de limpieza y desinfección a nivel hospitalario y odontológico.
- Su formulación genera en la aplicación una espuma ligera no adhesiva que permite un mejor manejo en el área de limpieza.
- Limpia y desinfecta las superficies sin deteriorar los materiales. Ligero olor a pomelo.
- **Surfalkan SH** presenta actividad esporicida sobre *Clostridium difficile*.
- Rendimiento total de 1.000 aplicaciones.

COMPOSICIÓN

Alcohol Etilico (30,50 g/kg) + Cloruro de Alquilbencildimetilamonio (4 g/kg) (Amonio cuaternario de última generación).

CERTIFICACIÓN SANITARIA INVIMA No. 2017001293.

PRECAUCIONES GENERALES

1. Utilice los productos para la limpieza y desinfección con precaución.
2. No usar para el lavado de instrumental o de dispositivos médicos.
3. Consulte la hoja de seguridad en www.alkamedica.com

SEGURIDAD DEL PRODUCTO



No tóxico. No irritante.
No sensibilizante.
No contiene sustancias
alergénicas.



No corrosivo.
No mancha.
Sin EDTA y sin NTA.



Utilizar elementos de
protección personal.



Uso hospitalario.



Producto **amigable con el ambiente**.
Producto **biodegradable**.

PRESENTACIÓN COMERCIAL

Presentación en frasco de 750 mL con aspersor.

INSTRUCCIONES DE USO Ver al respaldo.

PROPIEDADES MICROBIOLÓGICAS

ACTIVIDAD	ENSAYO	MICROORGANISMO	TIEMPO DE CONTACTO
BACTERICIDA	EN 1276	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Escherichia coli</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Enterococcus hirae</i>	30 SEGUNDOS
	EN 13697	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Escherichia coli</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Enterococcus hirae</i>	5 MINUTOS
FUNGICIDA	EN 1650	<i>Candida albicans</i>	1 MINUTO
	EN 13697	<i>Candida albicans</i>	1 MINUTO
	AOAC 955.15	<i>Candida auris</i> CDCB11903	ACCIÓN INMEDIATA
		<i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC16404	ACCIÓN INMEDIATA
VIRUCIDA	EN 14476	<i>Norovirus</i> , <i>Rotavirus</i>	5 MINUTOS
	EUCAST 2011	<i>Morbilivirus</i> (ATCC CCL - 34). <i>Paramyxoviridae</i> (0.05%)	5 MINUTOS
	CLSI 2012	<i>Parvovirus</i> (ATCC VR - 2209). <i>Parvoviridae</i> (0.05%)	5 MINUTOS
ESPORICIDA	EN 13704	<i>Clostridium difficile</i>	15 MINUTOS

ALKAMEDICA[®] S.A.S. REPRESENTANTE EXCLUSIVO Y ÚNICO IMPORTADOR PARA COLOMBIA DE ALKAPHARM FRANCIA.

☎ **Manizales:** (6) 889 44 60 - (6) 889 44 57 - 301 571 1865 / **Bogotá:** (1) 432 70 95 - 322 535 1839

Línea gratuita nacional: 01 8000 41 3707

✉ servicioalcliente@alkamedica.com

📍 Km 4 vía Panamericana, Parquecentro Bodega 9B / **Manizales - Colombia.**




www.alkamedica.com



ALKAMEDICA[®]
CUIDAMOS LA VIDA

Surfalkan SH[®] | INSTRUCCIONES DE USO

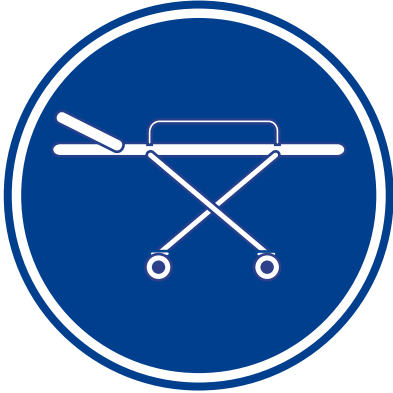

1.

Asegúrese que la superficie a limpiar y desinfectar se encuentre libre de sobreacumulación de polvo o materia orgánica.




2.

Aplice el producto directamente sobre toda la zona que desea limpiar y desinfectar.



3.

Distribuya uniformemente con un paño no tejido respetando la técnica de limpieza y deje secar.

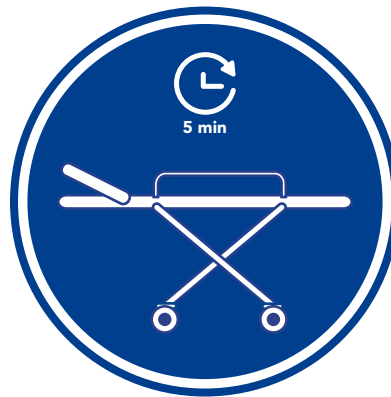

4.

Deje actuar el producto sobre la superficie donde fue aplicado. Tiempo de contacto total de 5 minutos.



5.

No enjuague ni retire el producto. La superficie quedará libre de microorganismos patógenos.